

## INSTRUCCIONES DE USO

1. VERIFIQUE LA INTEGRIDAD DEL EMPAQUE.
2. VERIFIQUE LA CADUCIDAD DEL EMPAQUE.
3. RASGUE CON CUIDADO UNA ESQUINA DEL EMPAQUE ALUMINIZADO DE KON-DO. EVITA QUE LAS UÑAS DAÑEN EL CONDÓN YA QUE PUEDEN PERFORARLO Y DESENRÓLLALO UN POCO PARA VER DE QUÉ LADO LO TIENES QUE COLOCAR.
4. CUANDO EL PENE ESTÁ ERECTO Y ANTES DE INICIAR EL CONTACTO SEXUAL, COLOCA EL CONDÓN EN LA CABEZA (GLANDE) DEL PENE. ANTES DE DESENROLLAR EL CONDÓN, ASEGÚRATE DE APRETAR EL RECEPTÁCULO (PUNTA) DEL CONDÓN CON LOS DEDOS PARA EXPULSAR EL AIRE. CON LA FRICCIÓN, UNA BURBUJA DE AIRE PUEDE LLEGAR A ROMPERLO.
5. DESENROLLA EL CONDÓN A LO LARGO DEL PENE HASTA QUE EL ANILLO QUEDE LO MÁS CERCA POSIBLE DEL CUERPO. DEBIDO A QUE CON FRECUENCIA HAY SECRECIÓN DE ESPERMA ANTES DE LA EYACULACIÓN, EVITA EL CONTACTO SEXUAL ANTES DE COLOCARSE EL CONDÓN.
6. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA EYACULACIÓN Y ANTES DE QUE EL PENE PIERDA SU FIRMEZA, RETÍRALO DE LA VAGINA SOSTENIENDO EL ANILLO DEL CONDÓN PARA QUE SIGA CUBRIENDO EL PENE.
7. TIRA EL CONDÓN A LA BASURA YA QUE SÓLO SIRVE UNA VEZ.
8. NINGÚN ANTICONCEPTIVO PUEDE GARANTIZAR UNA PROTECCIÓN AL 100%. SI SE USAN APROPIADAMENTE LOS CONDONES DE LÁTEX, PUEDEN AYUDAR A REDUCIR EL RIESGO DE LA TRANSMISIÓN DE INFECCIÓN POR VIH (SIDA) Y OTRAS INFECCIONES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE COMO CLAMIDIASIS, HERPES GENITAL, VERRUGAS GENITALES, GONORREA, HEPATITIS B Y SÍFILIS. AYUDAN A LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y A LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO.
9. EL CONDÓN CONTIENE HULE LÁTEX QUE PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS.
10. SI DESEAS UNA MAYOR LUBRICACIÓN VAGINAL, LOS CONDONES KON-DO PUEDEN SER UTILIZADOS EN COMPAÑÍA DE UN GEL LUBRICANTE A BASE DE AGUA.
11. EVITE EL USO DE LUBRICANTES A BASE DEL PETRÓLEO COMO: VASELINA, ACEITE PARA BEBÉS, LOCIONES CORPORALES, ACEITES DE MASAJE, ASÍ COMO MANTEQUILLA, MARGARINA, ETC., YA QUE PERJUDICAN LA INTEGRIDAD DEL CONDÓN.
12. SI SE ESTÁ UTILIZANDO ALGÚN MEDICAMENTO DE USO TÓPICO EN EL PENE O VAGINA, CONSULTE A SU MÉDICO ACERCA DE LA COMPATIBILIDAD DEL MEDICAMENTO CON EL CONDÓN.